

ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ο υποδόριος καθετήρας έχει γρήγορη και εύκολη εισαγωγή 90 μοιρών, υποστηρίζοντας την αυτο-διαχείριση του ασθενούς. Έχει ελεγχθεί για την ασφαλή χρήση με φάρμακα σχεδιασμένα για υποδόρια ειδική έγχυση.

Μήκος βελόνας

6 mm, 9 mm


Μήκος σωλήνωσης

70 cm


Οδηγίες εφαρμογής & χρήσης




Καθαρίστε τα χέρια σας, με νερό πολύ προσεκτικά. Σκουπίστε τα, ώστε να είναι στεγνά.

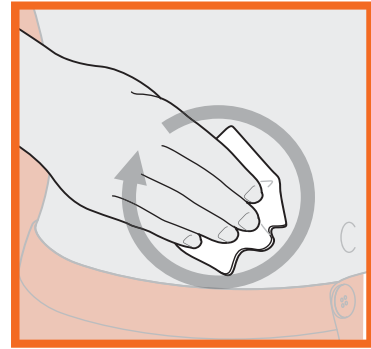


Καθαρίστε το σημείο του σώματος σας που θα εφαρμόσετε τον καθετήρα με ένα απολυμαντικό μαντηλάκι. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο είναι στεγνό αφαιρώντας την υπερβολική τριχοφυΐα.

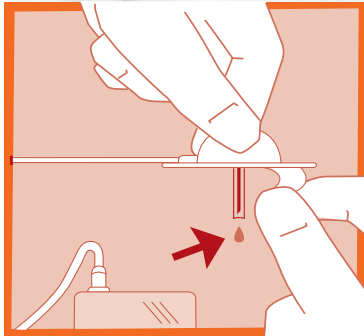


Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της ταινίας, προσέξτε να μην αγγίξετε την κολλητική ουσία.

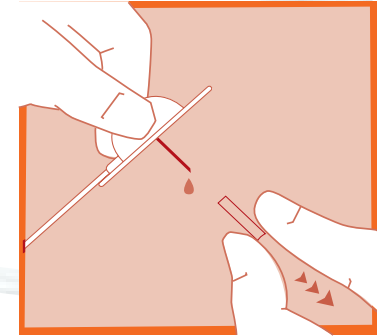

Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα της βελόνας.

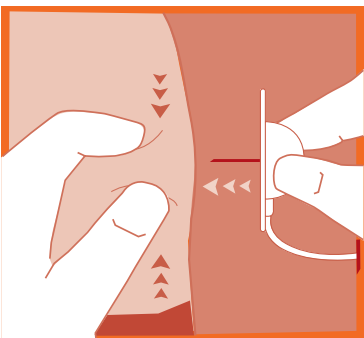

Τσιμπήστε το δέρμα με το ένα χέρι και τοποθετήστε κάθετα την βελόνα.

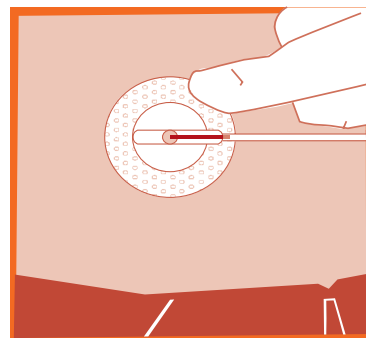

Βεβαιωθείτε ότι θα ακούσετε το κλικ κατά το κούμπωμα του καθετήρα στη βάση έγχυσης.

Ενδείξεις χρήσης

Το παρόν προϊόν ενδείκνυται για την υποδόρια έγχυση φαρμάκου.

Αντενδείξεις

Τα σετ έγχυσης ενδείκνυνται για υποδόρια χρήση μόνο και όχι για ενδοφλέβια (IV) έγχυση ή έγχυση αίματος ή προϊόντων αίματος.

Προειδοποιήσεις

Η εσφαλμένη εισαγωγή και φροντίδα του σημείου έγχυσης ενδέχεται να οδηγήσει σε μη ακριβή χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, λοίμωξη ή/και τοπικό ερεθισμό.

Πριν από την εισαγωγή, καθαρίστε το σημείο εισαγωγής με ισοπροπυλική αλκοόλη.

Πριν από την εισαγωγή του σετ έγχυσης, αφαιρέστε το προστατευτικό βελόνας.

Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το σετ έγχυσης για πρώτη φορά, πραγματοποιήστε την αρχική ρύθμιση παρουσία ενός επαγγελματία υγείας.

Μην αφήνετε αέρα μέσα στο σετ έγχυσης. Γεμίστε το πλήρως.

Αν παρουσιαστεί φλεγμονή στο σημείο έγχυσης, αντικαταστήστε το σετ και χρησιμοποιήστε ένα νέο σημείο έως ότου να επουλωθεί το πρώτο σημείο. Αντικαταστήστε το σετ έγχυσης σε περίπτωση που χαλαρώσει η ταινία ή αν η μαλακή κάνουλα έχει εκτοπιστεί πλήρως ή μερικώς από το δέρμα.

Αντικαταστήστε το σετ έγχυσης κάθε 48-72 ώρες ή σύμφωνα με τις οδηγίες του επαγγελματία υγείας.

Μη γεμίζετε ποτέ το σετ και μην επιχειρείτε να απελευθερώσετε μια αποφραγμένη γραμμή ενώ το σετ είναι εισηγμένο. Ενδέχεται να εγχυθεί κατά λάθος υπερβολική ποσότητα φαρμακευτικής αγωγής.

Μην βάζετε απολυμαντικά, αρώματα ή αποσμητικά στο σετ έγχυσης καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν την ακεραιότητα του σετ.

Το παρόν προϊόν είναι στείρο και μη πυρετογόνο, εκτός αν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί βλάβη. Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί βλάβη.

Αποθηκεύστε τα σετ έγχυσης σε δροσερό, ξηρό μέρος. Μην αφήνετε τα σετ έγχυσης εκτεθειμένα στο απευθείας ηλιακό φως ή μέσα σε οχήματα.

Να χρησιμοποιείτε άσηπτες τεχνικές όταν αποσυνδέετε προσωρινά το σετ και να συμβουλευέστε τον επαγγελματία υγείας σας σχετικά με τον τρόπο αναπλήρωσης τυχόν φαρμακευτικής αγωγής που απωλέσθει κατά την αποσύνδεση.

Σε περίπτωση αμφιβολιών, αλλάξτε το σετ έγχυσης επειδή η μαλακή κάνουλα μπορεί να έχει εκτοπιστεί, πτυχωθεί ή/και εν μέρει αποφραχθεί. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε από τα προβλήματα αυτά, κάντε ένα πλάνο με τον επαγγελματία υγείας σας για την ταχεία αναπλήρωση της ινσουλίνας. Ελέγξτε το επίπεδο γλυκόζης του αίματός σας για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει διορθωθεί.